



# HEMOSURE® iFOB TEST


-Prueba inmunológica para detectar sangre oculta en material fecal (FIT)

Nota: Sin restricciones alimenticias o de medicamentos

## Instrucciones para el paciente

### PASO 1 *Depósito de la muestra*

**A** Levante el asiento del inodoro y coloque el papel de recolección a lo largo del borde de la taza del inodoro. Asegure las lengüetas adhesivas a los lados del borde del inodoro. Baje el asiento del inodoro.

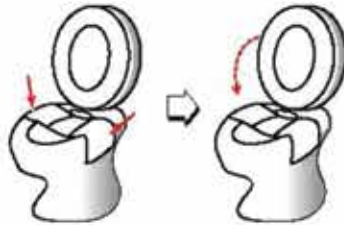

**B** Evacúe o defeca sobre el papel de recolección.




### PASO 2 *Recolección de la muestra*

**A** Desatornille la tupa morada del tubo de recolección de muestra. **NO TIRE EL LÍQUIDO QUE ESTÁ ADENTRO**



**B** Introduzca la punta del aplicador en espiral en 6 lugares diferentes de las heces. Utilice solamente la material fecal necesaria para cubrir la punta del aplicador. **NO AMONTONE, PONGA CUCHARADAS O TRATE DE LLENAR EL TUBO.**

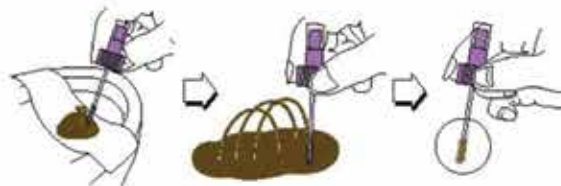

**C** Atornille de nuevo el aplicador dentro del tubo y apriételo de manera segura.



### PASO 3 *Devolución de la muestra*

**A** Escriba el remitente en el sobre y envíelo a su doctor o laboratorio.



**B** Introduzca el tubo con la muestra recolectada dentro de la bolsa para espécimen y séllela. Introduzca la bolsa del espécimen dentro del sobre y séllelo.



**C** Regrese inmediatamente el paquete con la muestra a la clínica o al laboratorio por correo o en persona.



**HEMOSURE, INC**