



HEMOSURE[®] iFOB TEST

-免疫科学的便潜血テスト (FIT)


注意：食事制限や投与制限なし

手順

STEP 1 便をする

A

トイレのシートをあげ、紙をトイレの端から端にかかるようにセットします。接着テープで端を固定した後にシートをおろします。

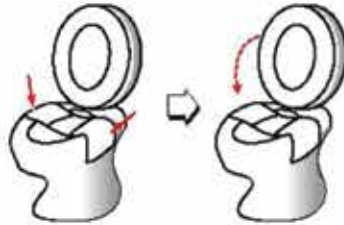

B

紙の上に便をします。



注意!

チューブに付いているマベルに情報を記入しておくこと



STEP 2 便を収める


A

検便チューブの紫のキャップを外します。内部の液体を捨てないこと。




B

スパイラルアプリケータで6か所の異なる場所をつきます。アプリケータの端に付くほどで十分です。すくったり、チューブをいっぱいにならないこと。

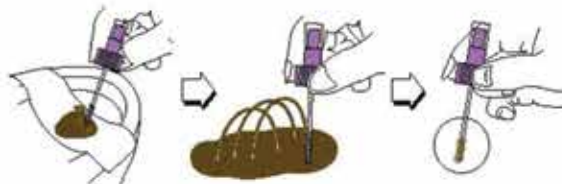

C

アプリケータを戻し、きつくキャップを締める

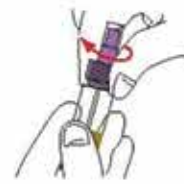

STEP 3 返送する

A

返送用の封筒を完全に記入する



B

検便チューブをパウチに入れ、封をする。パウチを封筒に入れ、封をする



C

封筒をただちに郵送するか、病院に届ける



HEMOSURE, INC