



HEMOSURE® iFOB TEST

-Immunochemical Fecal Occult Blood Test (FIT)




Observação: Sem Restrições de Dieta ou Drogas

Instruções ao Paciente

PASSO 1 Depósito de Amostra

A Levante o assento do vaso e posicione o papel de coleta de amostras através da bacia do vaso. Prenda as abas adesivas aos lados da borda do vaso. Abaixei o assento do vaso.

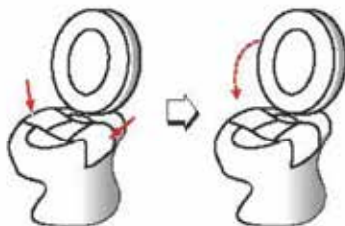

B Evacue no papel de coleta



Atenção!

Preencha as informações pessoais na etiqueta presa nos tubos.




PASSO 2 Coleta da Amostra

A Desparafuse a tampa roxa do tubo de coleta de amostras. **NÃO JOGUE O LÍQUIDO FORA**



B Enfie o aplicador em espiral nas fezes em 6 lugares diferentes. Use apenas material fecal o bastante para cobrir a ponta do aplicador. **NÃO ACUMULE, CAVE, OU ENCHA O TUBO.**

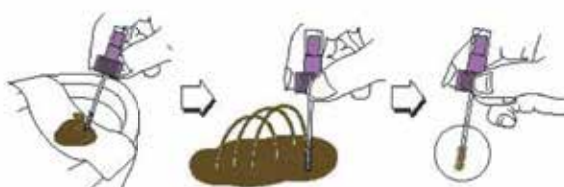

C Enrosque o aplicador de volta no tubo e prenda com força.



PASSO 3 Devolução da Amostra

A Complete o envelope de endereço de retorno para seu médico ou laboratório.



B Insira o tubo de coleta de amostras na bolsa e sele. Insira a bolsa no envelope de retorno e sele.



C Devolva o pacote de amostra imediatamente para a clínica ou laboratório pelo correio ou pessoalmente.



HEMOSURE, INC

O logotipo Hemosure é uma marca registrada da Hemosure, Inc.

