



XÉT NGHIỆM HEMOSURE® iFOB

Kiểm tra Máu ẩn trong Phân
qua phân tích hóa học của Hệ thống miễn dịch (FIT)




Chú ý: Không hạn chế ăn uống hoặc dùng thuốc

Hướng dẫn bệnh nhân

BƯỚC 1 Cách Đặt Giấy Lấy Mẫu Phân

A Nâng đứng nắp ngồi của bồn vệ sinh. Trải giấy lấy mẫu thử ngang 2 rìa của bồn. Giữ 2 rìa giấy mẫu dính vào rìa bồn vệ sinh. Hạ nắp xuống.

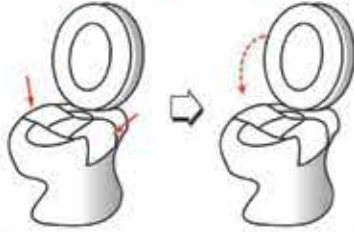

B Hạ người ngồi lên bồn sao cho hậu môn vào tâm mặt giấy.



Chú ý!

Điền đầy đủ thông tin cá nhân vào Tô giấy đính kèm trên Ống mẫu phân.




BƯỚC 2 Cách Thu Thập Mẫu Phân


A Xoay ngược đồng hồ nắp màu tím của Ống mẫu. **KHÔNG ĐƯỢC BỎ DUNG DỊCH TRONG ỐNG MẪU.**



B Tay giữ đầu Ống đâm thẳng nhẹ vừa đủ ngấm đoạn đầu xoắn của thân nắp vào 6 vị trí khác nhau của mẫu phân. **KHÔNG LẤY THÀNH CỤC, XÚC HAY QUÁ ĐẦY.**

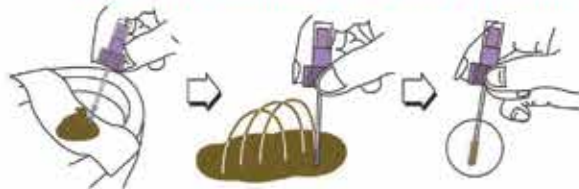

C Đẩy chặt nắp lại theo chiều kim đồng hồ vào Ống mẫu thử.

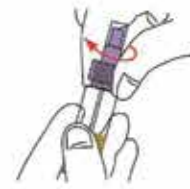

BƯỚC 3 Gửi Mẫu Phân đến Phòng Xét Nghiệm

A Điền đầy đủ thông tin và địa chỉ người gửi & người nhận là bác sĩ hoặc phòng xét nghiệm vào Phong thư riêng.



B Đặt Ống mẫu phân vào một túi đặc biệt và được dán kín lại, sau đó được cho vào Phong thư ở Bước A đã có đầy đủ thông tin gửi và nhận rồi dán kín tất cả lại.



C Lập tức gửi ngay tất cả trực tiếp hoặc qua Bưu điện đến Bệnh viện hay Phòng xét nghiệm.



HEMOSURE, INC.

Hemosure logo là nhãn hiệu đã được đăng ký của Công ty Hemosure, Inc.