


FIT使用說明書

(糞便免疫化學隱血測試)

採樣說明：
無需前期準備或忌口

本包裝內包括：

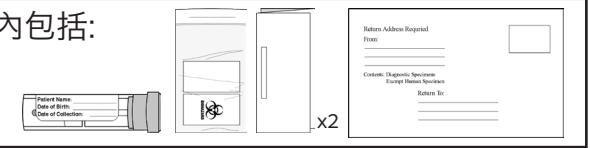

1

❗ 重要提示!
填寫您的姓名，生日，分辨樣本採集日期，於採集管上的標籤。

2

放置樣本採樣紙於座便器上方，用粘劑固定於其邊緣。放下座圈。

3

排便於採樣紙上。

4

從樣本收集管抽出，採樣棒。

5

在**6**個不同的部位將採樣棒戳入糞便樣本中取樣。

6

將採樣棒塞回採樣管。

7

先將採樣管插入標本袋並密封。
再將標本袋放入回執信封中並密封。

8

通過郵寄或本人親自將樣本遞送至指定樣本收集地點。

以下行為會導致檢測結果無效：

- 糞便採樣過量
- 樣本被冷凍或加熱
- 採集在便池中被水或者尿液稀釋的糞便
- 樣本在採樣8日後送達指定收集地點

對於綜上說明如有任何質疑，請聯繫：

- 你的主治醫師辦公室
或者
- 致電 Hemosure:
1-888-HEMOSURE (436-6787)
電子郵件: techsupport@hemosure.com