


FITの使い方

(検便キット)

採便に際して：
特に必要な準備はありません。
食事制限等も不要です。

キット内容：

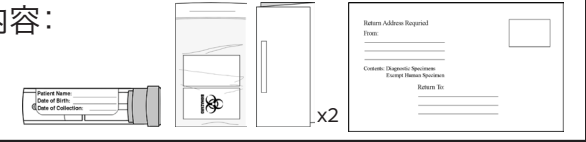

1

❗ **重要!**
採便管に氏名、誕生日、検便日をお書きください。

2

便座を上げて採便シートを便器の上に広げ、接着部分を固定し便座を下げます。

3

採便管シートに排便します。

4

採便管のふたを開けます。

5

スティックのらせん状の先端を便の異なる位置に6回ほど突き刺します。

6

採便管のふたを閉めます。

7

採便管を検体袋に入れ、その検体袋をさらに返信用封筒に入れ、封をします。

8

検体を郵便にて送るか、お近くの検体回収センターまでお持ちください。

次の場合正常な結果が得られない場合があります。

- 便の採取量が多すぎる場合
- 検体が凍った、または加熱されてしまった場合
- 採便中に便が水や尿と接触した場合
- 採便から回収までに8日以上が経過した場合

採便方法に関してサポートが必要な場合は、

かかりつけの内科医にご相談いただくか、
Hemosureテクニカルサポートまでお問合せください。

電話：1-888-HEMOSURE (436-6787)

メール：techsupport@hemosure.com