


FIT使用说明书

(粪便免疫化学隐血测试)

采样说明:
无需前期准备或忌口

本包装内包括:

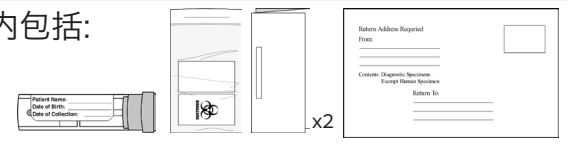

1

重要提示!
填写您的姓名, 生日, 分辨样本采集的日期,
于采集管上的标签。

2

放置样本采样纸于座便器上方,
用粘合剂固定于其边缘。放下座圈。

3

排便于采样纸上。

4

从样本收集管抽出, 采样棒。

5

在**6**个不同的部位将采样棒戳入粪便样本中取样。

6

将采样棒塞回采样管。

7

先将采样管插入标本袋并密封。
再将标本袋放入回执信封中并密封。

8

通过邮寄或本人亲自将样本递送至指定样本收集地点。

以下行为会导致检测结果无效:

- 粪便采样过量
- 样本被冷冻或加热
- 采集在便池中被水或者尿液稀释的粪便
- 样本在采样8日后送达指定收集地点

对于综合说明如有任何质疑, 请联系:

- 你的主治医师办公室
或者
- 致电 Hemosure:
1-888-HEMOSURE (436-6787)
电子邮件: techsupport@hemosure.com