


Cách sử dụng FIT


(Xét nghiệm tìm máu ẩn trong phân)

Hướng dẫn lấy:
Không cần phải chuẩn bị trước
và không có hạn chế ăn uống.

Một kit test FIT
bao gồm:

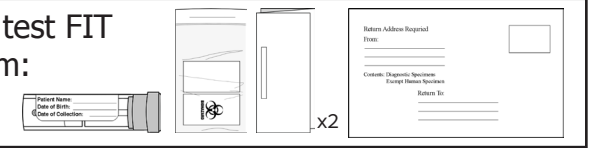

1

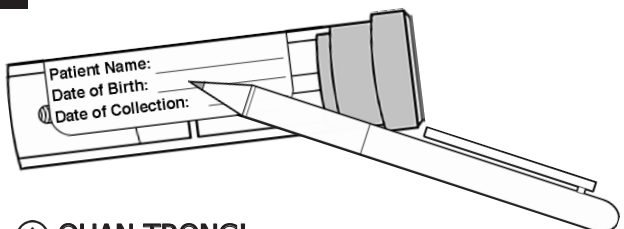

⚠ QUAN TRỌNG!
Hãy viết **tên, ngày sinh, và ngày lấy mẫu**
trên ống lấy mẫu.

2




Đặt giấy thu thập mẫu lên bồn cầu. Cố định các
miếng dán và sau đó hạ bệ ngồi bồn cầu xuống.

3




Để phân trên giấy thu thập.

4

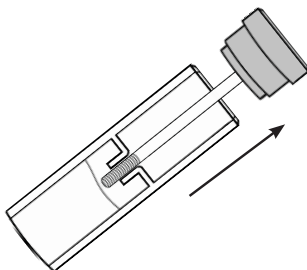


Mở ống lấy mẫu.

5

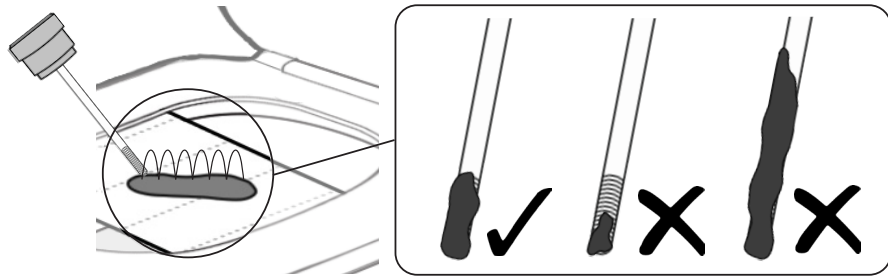


Chọc đầu que xoắn ốc vào phân ở **6 (sáu)** vị trí khác nhau.

6

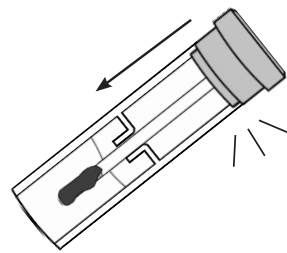


Đóng ống lấy mẫu.

7

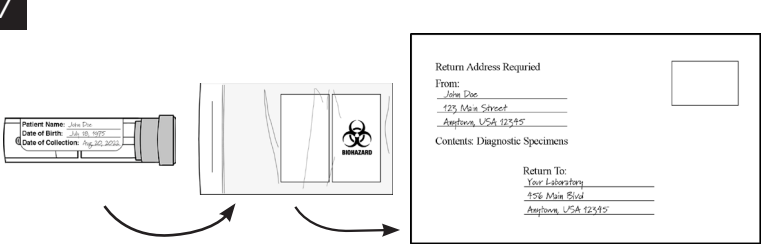

Cho ống lấy mẫu vào túi đựng mẫu.
Sau đó cho túi đựng mẫu vào bì thư hoàn trả và niêm phong.

8

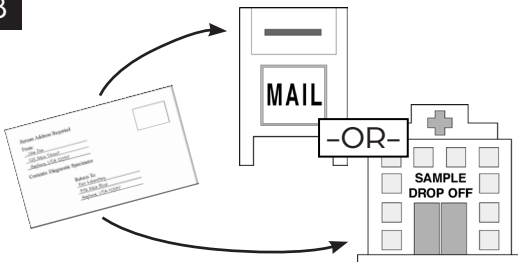

Gửi lại ngay lập tức qua thư hoặc trực tiếp tại địa
điểm gửi mẫu của bạn.

Kết quả có thể không có giá trị nếu:

- Lấy quá nhiều phân
- Mẫu bị đông lạnh hoặc quá nóng
- Phân dính nước hoặc nước tiêu trong bồn cầu
- Bưu phẩm mẫu phải được chuyển tới đúng
nơi nhận sau 8 ngày

Để được hỗ trợ về các hướng dẫn này, vui lòng liên hệ:

- Hòng khám của bạn
HOẶC
- Hỗ trợ kĩ thuật của Hemosure:
1-888-HEMOSURE (436-6787)
E-mail: techsupport@hemosure.com