


FIT사용법

(분변 면역 검사)

채취 지침:
사전 준비가 필요 없으며 식사
제한도 없습니다.

FIT 키트 내용물:

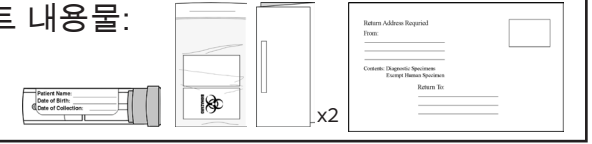

1

! 중요!
샘플 채취병에 이름, 생년월일, 채취 날짜를 기재합니다.

2

변기에 샘플 채취 용지를 가로로 놓습니다. 접착 탭을 고정한 다음 변기 시트를 내립니다.

3

채취 용지 위에 배변을 합니다.

4

샘플 채취병을 엽니다.

5

나선형 채변 스틱으로 분변의 각기 다른 부위를 6회 찌릅니다.

6

샘플 채취병을 닫습니다.

7

샘플 채취병을 검체 파우치에 넣은 후, 검체 파우치를 반송 우편 봉투에 넣고 밀봉합니다.

8

즉시 우편으로 부치거나 샘플 제출 장소에서 직접 반환하십시오.

다음과 같은 경우 결과가 유효하지 않을 수 있습니다:

- 대변을 너무 많이 채취했을 경우
- 샘플이 얼거나 과열된 경우
- 대변이 변기의 물이나 소변에 닿은 경우
- 샘플이 채취일에서부터 8일 이후에 반환된 경우

지침에 대한 도움이 필요한 경우 다음에 문의하십시오:

- 담당의사 또는
- Hemosure 기술 지원:
1-888-HEMOSURE (436-6787)
이메일: techsupport@hemosure.com