

# Paggamit ng FIT

## (Fecal Immunological Test)

Mga Tagubilin sa Pagkolekta:  
Walang kinakailangang paghahanda at walang mga paghihigpit sa pagkain.

Kasama sa FIT package na ito ang:



**1**

**! MAHALAGA!**  
Ilagay ang inyong **pangalan, petsa ng kapanganakan, at petsa ng koleksyon** on the sample collection tube. (sampol na tubo ng koleksyon).

**2**

Ilatag ang sampol collection paper sa inidoro. Tiyakin ang adhesive tabs ay nakadikit sa magkabilang gilid ng inidoro at pagkatapos ay ibaba ang takip ng inidoro.

**3**

Ilagay ang dumi ng tao sa collection paper.

**4**

Buksan ang sampol collection tube (sampol na tubo ng koleksyon).

**5**

Isundot ang spiral applicator sa dumi ng tao sa **6 (ANIM)** na magkakaibang lokasyon.

**6**

Isara ang sampol collection tube (sampol na tubo ng koleksyon).

**7**

Ipasok ang sampol collection tube (sampol na tubo ng koleksyon) sa loob ng ispesemen pouch. Pagkatapos ay ipasok ang ispesemen pouch sa loob ng return mailer at selyuhan.

Return Address Required  
From: \_\_\_\_\_  
John Doe  
425 Main Street  
Anytown, USA 12345  
Contents: Diagnostic Specimens  
Return To:  
Your Laboratory  
756 Main Blvd  
Anytown, USA 12345

**8**

Bumalik kaagad sa pamamagitan ng koreo o nang personal sa iyong sample drop-off na lokasyon.

**Maaaring maging imbalido ang mga resulta kung:**

- Sobrang dami ng dumi ng tao ang nakolekta
- Ang sampol ay nagyeyelo o sobrang napapintan
- Ang dumi ay dumampi sa tubig o ihi na nasa inidoro
- ang sample ay naibalik pagkatapos pa ng 8 araw

**Para sa tulong sa mga instruksyong ito, mangyaring makipag-ugnayan sa:**

- Tanggapan ng iyong doktor
- Hemosure technical support: 1-888-HEMOSURE (436-6787) E-mail: techsupport@hemosure.com