


Uso de la PIF

(Prueba Inmunoquímica Fecal)

Instrucciones de recolección:
No se requiere preparación y no hay restricciones alimenticias.

Este Kit incluye:

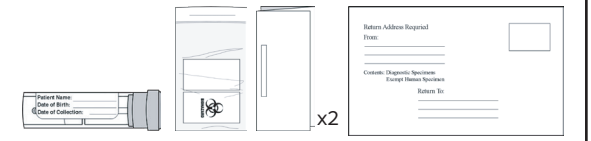

1

¡IMPORTANTE!
En el tubo, escribe su **nombre, fecha de nacimiento, y fecha de colección.**

2

Coloque el papel a lo largo del borde de la taza. Asegure las lengüetas adhesivas a los lados del borde del inodoro y luego baje el asiento del inodoro.

3

Deposite las heces sobre el papel de recolección

4

Abra el tubo de muestras.

5

Introduzca el palito en las heces en **6 (seis)** diferentes lugares.

6

Ponga el palito en el tubo y cierre la tapa.

7

Ponga el tubo con la muestra recolectada dentro de la bolsa de espécimen. Luego, coloque la bolsa de muestra en el correo de devolución.

Return Address Required
From: _____
John Doe
425 Main Street
Anytown, USA 12345

Contents: Diagnostic Specimens

Return To:
Your Laboratory
P.O. Box 1234
Anytown, USA 12345

8

Regrese inmediatamente por correo o en persona a su lugar de entrega de la muestra.

Los resultados podrían quedar invalidos si:

- Se recogen demasiadas heces.
- La muestra está congelada o expuesta a calor excesivo
- Las heces tocan el agua o la orina en la taza del inodoro
- La muestra se devuelve después de los 8 días

Para obtener ayuda con estas instrucciones, comuníquese con:

- La oficina de sus medico
- o
- Apoyo tecnico de Hemosure: 1-888-HEMOSURE (436-6787) E-mail: techsupport@hemosure.com

HEMOSURE®
AccuREADER® A100