
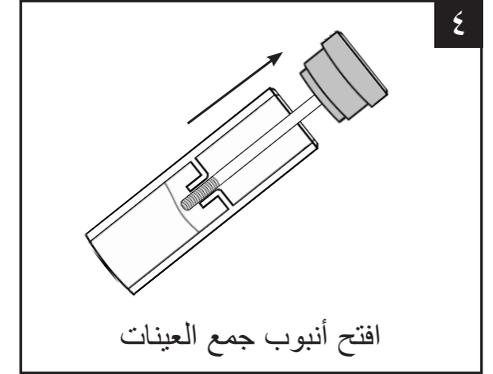
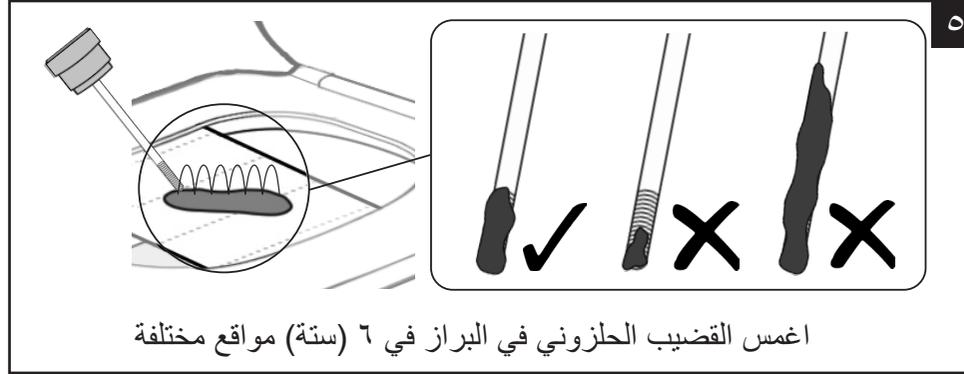
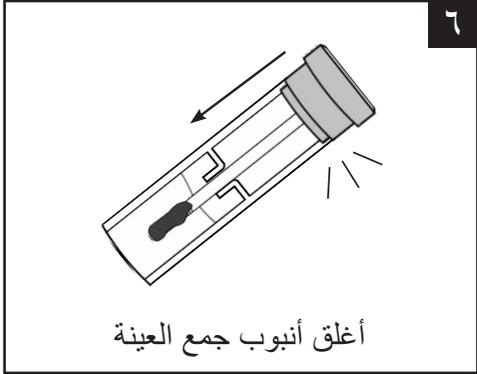
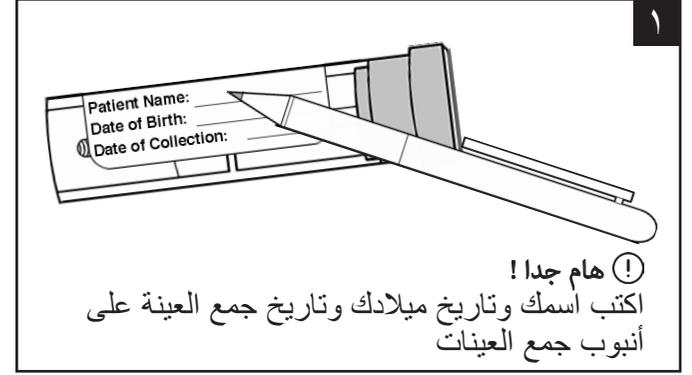


# طريقة استخدام (اختبار البراز المناعي)

تعليمات التجميع  
لا يلزم التحضير ولا توجد قيود على الطعام

هذه الحزمة  
تشمل:

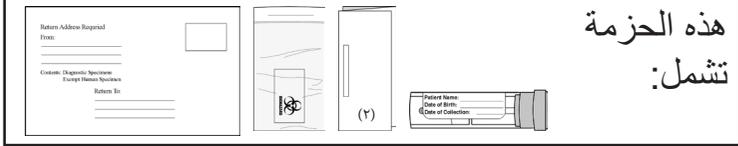

قد تكون النتائج غير صالحة إذ:  
تم جمع الكثير من البراز  
تم تجميد أو تسخين العينة  
إذا لامس البراز الماء أو البول في وعاء المراض  
إذا تم أرجاع العينة بعده أيام

للمساعدة في هذه التعليمات ، يرجى الاتصال:  
مكتب طبيب

أو  
1-888-HEMOSURE (436-6787) - الدعم الفني :  
techsupport@hemasure.com : البريد الإلكتروني

