


# การใช้ FIT

(การตรวจหาเลือดแฝงในอุจจาระ)

วิธีการเก็บอุจจาระ:  
ไม่ต้องทำการเตรียมการและไม่มี  
ข้อจำกัดทางด้านอาหาร

อุปกรณ์การตรวจ FIT  
ประกอบไปด้วย

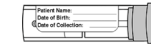

**1**

**! สำคัญ!**  
เขียนชื่อ วันเกิด และวันที่ เก็บตัวอย่าง  
บนหลอดสำหรับเก็บอุจจาระ

**2**

วางกระดาษรองอุจจาระบนชักโครกตามรูป  
จากนั้น ใช้แผ่นกาวติดทั้ง สองด้านและเอาฝารองนั่งลง

**3**

ถ่ายอุจจาระลงบนกระดาษ

**4**

เปิดหลอดเก็บอุจจาระ

**5**

ใช้ไม้ปลายเกลียวจี้ มอุจจาระ 6 (หก) ตำแหน่งที่ แตกต่างกันให้ทั่ว

**6**

ปิดหลอดเก็บอุจจาระ

**7**

นำหลอดเก็บอุจจาระใส่ ในถุงซิ บเก็บตัวอย่าง  
จากนั้น นำถุงซิ บเก็บตัวอย่างใส่ ในซองจดหมายและฉีกซอง

**8**

ส่งคืนทันที ผ่านทางไปรษณีย์หรือด้วยตนเอง  
ที่ สถานที่ ส่งตัวอย่าง

**ผลลัพธ์อาจจะไม่ถูกต้องถ้า:**

- เก็บอุจจาระมากเกินไป
- ตัวอย่างถูกแช่แข็งหรือได้รับความร้อนมากเกินไป
- อุจจาระถูกน้ำ หรืออับสภาวะจากชักโครก
- ตัวอย่างถูกส่งกลับหลังจาก 8 วัน

**สำหรับความช่วยเหลือ ด้านคำแนะนำเหล่านี้โปรดติดต่อ:**

- แพทย์ของคุณ หรือ
- หน่วยสนับสนุนทางเทคนิคของ Hemosure: 1-888-HEMOSURE (436-6787) อีเมล: techsupport@hemosure.com

